

SOEHNLE


A. Riegger
Arzt + Spitalbedarf AG
BASEL


PROFESSIONAL

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Instrucciones de manejo
Käyttöohjeet
Kezelési útmutató
Manual de instruções

8310

470.065.300

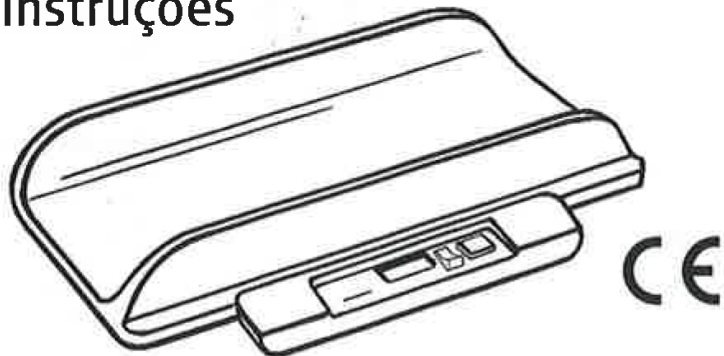

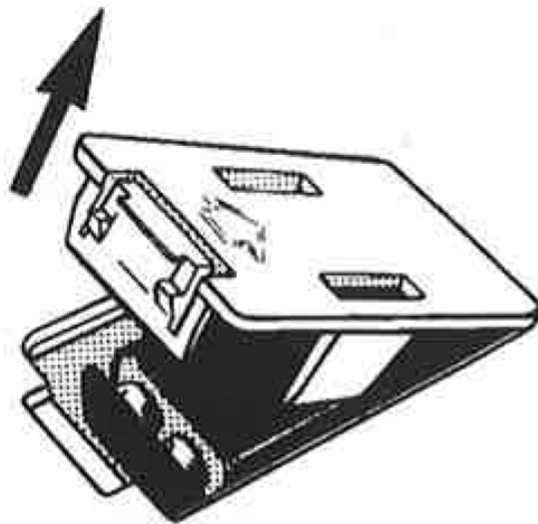

deutsch

Inbetriebnahme

9V-Blockbatterie 6 LR 61 im Batteriefach auf der Bodenplatte anschließen.

Die Waage kann das Gewicht in kg/g oder lb/oz anzeigen.

Umschalten der Gewichtseinheit

1. Bei ausgeschalteter Waage Taste ca. 5 Sekunden betätigen.
2. Durch kurzen Tastendruck zwischen kg/g und lb/oz-Anzeige wechseln.
3. Ein Tastendruck von ca. 5 Sekunden speichert die gewünschte Gewichtsanzeige.



Wiegen

1x drücken: Es erscheint eine Prüfanzeige "88888" - danach "0.00". Die Waage ist jetzt wiegebereit.

Achtung:

Ein wichtiges Merkmal dieser Waage ist die sogenannte "weight lock"-Funktion, die ab einem Gewichtswert von 2 kg aktiv ist. Beruhigt sich nach einer Belastung die Anzeige, erfolgt, zur besseren Ablesbarkeit, eine Fixierung dieses Wertes. Alle 10 Sekunden wird dieser Wert aktualisiert.

Tarieren

Durch einen Tastendruck kann jederzeit tariert werden.

Abschalten

Bei Anzeige "0.00" Taste drücken oder automatisch nach 2 Minuten.


Gesamtgewichts-anzeige

Waage tarieren, Wiegegut abnehmen. Gesamtgewichts-anzeige erscheint mit negativen Vorzeichen.



Benutzerkalibrierung

Sollte mit einem aufgelegten Prüfgewicht festgestellt werden, daß der angezeigte Gewichtswert nicht mit dem des Prüfgewichts übereinstimmt, kann die Waage an Ort und Stelle neu justiert werden: Dazu Waage auf ebene, stabile und waagerechte Unterlage stellen. Unbelastete Waage einschalten. Anzeige "0.00" abwarten. Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis in der Anzeige "C 0" erscheint. Anzeige "C 100" abwarten, 20 kg-Prüfgewicht auf die Waage stellen und Taste drücken. Anzeige "100" abwarten. Nach einem erneuten Tastendruck ist die Waage neu justiert und wiegebereit.

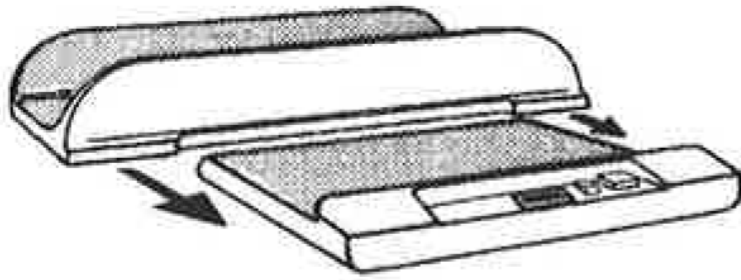

Einschieben der Babyschale

Schale an der Führungsschiene ansetzen und einschieben.



Überlast

Bitte beachten Sie den maximalen Wägebereich.



Unterlast

Waage belasten.



Batterie erneuern.

Verbrauchte Batterie als Sondermüll entsorgen.

Reinigung und Pflege

Für die Reinigung genügt ein feuchtes Tuch.

Bitte keine zusätzlichen Reinigungsmittel verwenden.