


Männliches Katheterisierungsmodell

LM 29

Bedienungshinweise

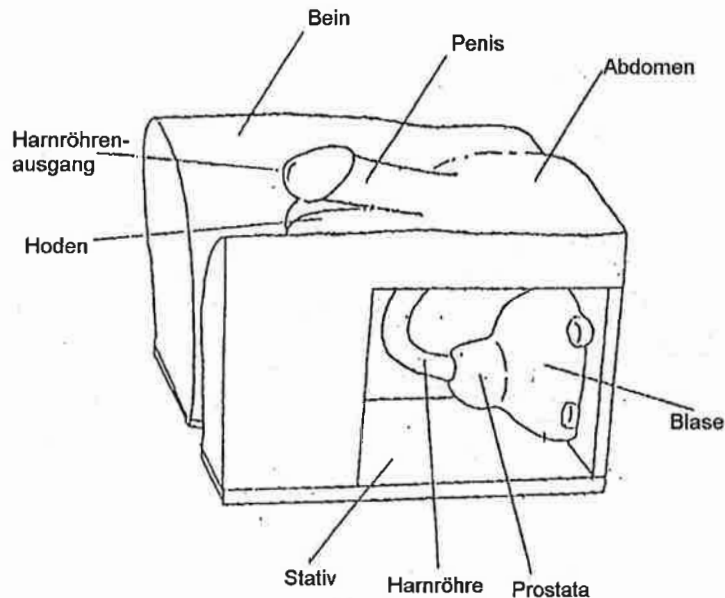

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Dieses Modell wurde aus Silikon hergestellt, um so realitätsnah wie möglich zu sein. Bitte behandeln Sie es mit der gleichen Sorgfalt, mit der Sie einen echten Menschen behandeln würden.
2. Verwenden Sie immer ein Gleitmittel. Spüren Sie zu starkem Widerstand, benützen Sie mehr Gleitmittel. Führen Sie den Katheter niemals mit Gewalt ein.
3. Lassen Sie das Modell niemals fallen. Der Sockel könnte brechen.
4. Das Innere des Modells besteht aus Schaumstoff. Tauchen Sie das Modell niemals unter Wasser, da sich der Schaumstoff ansonsten vollsaugt und schimmeln kann.
5. Setzen Sie das Modell niemals für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus. Bewahren Sie das Modell immer im mitgelieferten Koffer auf.
6. Entfernen Sie Klebstoffreste (Pflaster) mit Seifenwasser oder verdünntem Alkohol.
7. Verwenden Sie Katheter Größe 16FR oder kleiner.

Pflege:

1. **Gleitmittel entfernen**
Spülen Sie nach dem Üben den Harnleiter mit klarem Wasser durch. Halten Sie die Öffnung des Penis direkt an den Wasserhahn. Alternativ verwenden Sie eine normale Kunststoff – Spülflasche mit klarem Wasser. Die Blase kann zum Reinigen abgenommen werden.
2. **Haut und Stativ reinigen**
Reinigen Sie das Modell mit Wasser (kalt oder warm). Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit einem neutralen Reinigungsmittel.
3. **Trocknen Sie das Modell sorgfältig vor dem Lagern.** Bewahren Sie das Modell immer im mitgelieferten Koffer auf. Lagern Sie das Modell niemals auf dem Kopf stehend, das dies die Form des Modells verändert. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Modell.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Modell